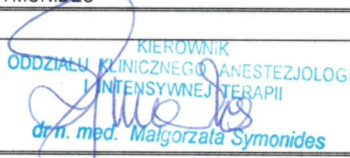
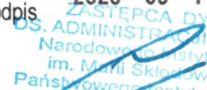
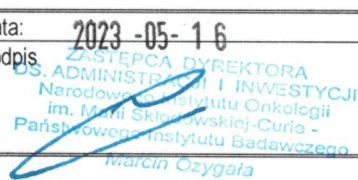


	INSTRUKCJA BHP – DEFIBRYLATOR MANUALNY	PR3_K1_IR3_W3
Proces: PR3	Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy	Strona 1 z 3
Opracował: Starszy Specjalista ds. BHP mgr inż. Błażej SOKOŁOWSKI	Sprawdził pod względem merytorycznym: Kierownik Działu Bezpieczeństwa Pracy i Nadzoru Środowiskowego mgr inż. Grażyna KĘDZIERSKA Kierownik Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii dr n. med. Małgorzata SYMONIDES	Zatwierdził: Zastępca Dyrektora ds. Administracji i Inwestycji mgr Marcin OZYGAŁA
Data: 26.04.2023	Data: 26.04.2023	Data: 2023-05-16
Podpis 	Podpis  	Podpis  
EGZEMPLARZ Informacyjny (nie podlega aktualizacji)		

I. Warunki dopuszczenia Pracownika do pracy:

1. Ukończone 18 lat (młodociany tylko w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem instruktora).
2. Zapoznanie się z instrukcją obsługi defibrylatora.
3. Posiadanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.
4. Wyposażenie w odzież roboczą oraz środki ochrony indywidualnej przewidziane dla danego stanowiska.

II. Czynności przed rozpoczęciem pracy:

1. Dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia.
2. Sprawdzić, czy nie ma widocznych uszkodzeń obudowy urządzenia, czy przewód zasilający i wtyczka oraz włącznik nie są uszkodzone.
3. Zauważone usterki zgłosić natychmiast przełożonemu.
4. Należy pamiętać, aby zawsze mieć natychmiastowy dostęp do zapasowego, w pełni naładowanego i właściwie konserwowanego akumulatora. Jeżeli na urządzeniu pojawi się ostrzeżenie o rozładowaniu akumulatora, należy dokonać jego wymiany lub podłączyć defibrylator do zasilania sieciowego.

III. Bezpieczne wykonywanie pracy:

1. Urządzenie w trybie automatycznej defibrylacji zewnętrznej może być obsługiwane przez upoważnionego pracownika, który posiada umiejętności i został przeszkolony w zakresie:
 - resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
 - posługiwania się defibrylatorem w trybie defibrylacji zewnętrznej (zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia).
2. Nie należy dotykać pacjenta podczas wyładowania energii przez urządzenie.
4. Nie należy zanurzać żadnej części urządzenia w wodzie ani w innych płynach, nie należy oblewać urządzenia lub akcesoriów płynami. Nie należy stosować akcesoriów urządzenia na mokrą skórę pacjenta.
5. Do czyszczenia urządzenia nie należy stosować ketonów ani innych środków łatwopalnych.
6. Nie należy umieszczać urządzenia ani jego akcesoriów w autoklawie ani sterylizować go w inny sposób, chyba że zostało to wyraźnie określone w instrukcji obsługi urządzenia.
7. Sprzęt pracujący w bliskim sąsiedztwie urządzenia może emitować silne zakłócenia elektromagnetyczne lub o częstotliwości radiowej (RFI), mogące wpływać na działanie defibrylatora. Zakłócenia o częstotliwości radiowej (RFI) mogą powodować niewłaściwe działanie urządzenia, wywoływać zniekształcenia zapisu EKG lub uniemożliwiać wykrycie rytmu wymagającego defibrylacji. Należy unikać używania defibrylatora w pobliżu przyrządów do kauteryzacji, diatermii, telefonów komórkowych lub innych przenośnych urządzeń radiokomunikacyjnych. Unikać nagłego włączania i wyłączania odbiorników radiowych EMS.
8. Korzystanie z kabli, elektrod i akcesoriów nieprzeznaczonych do pracy z używanym defibrylatorem może skutkować podwyższoną emisją lub obniżoną odpornością na zakłócenia elektromagnetyczne, co może wpływać na działanie defibrylatora lub urządzeń znajdujących się w jego pobliżu. Należy korzystać wyłącznie z części i akcesoriów wymienionych przez producenta w instrukcji obsługi.
9. Defibrylatory oraz ich akcesoria (w tym elektrody i kable) zawierają materiały ferromagnetyczne. Tak jak w przypadku każdego sprzętu zawierającego elementy ferromagnetyczne, urządzeń tych nie wolno używać w obecności silnych pól magnetycznych wytwarzanych przez urządzenia do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MRI). Silne pole magnetyczne wytwarzane przez MRI może spowodować przyciągnięcie części zawierających elementy ferromagnetyczne z siłą wystarczającą do spowodowania śmierci lub poważnych uszkodzeń ciała osób znajdujących się pomiędzy danym urządzeniem a urządzeniem MRI. Może także dojść do oparzeń skóry wskutek rozgrzewania się materiałów przewodzących, takich jak np. przewody podłączone do ciała pacjenta.
10. Nie należy obsługiwać defibrylatora mokrymi dłońmi.
11. Nie wolno pracować z uszkodzonym urządzeniem ani jego akcesoriami.

IV. Czynności po zakończeniu pracy:

1. Wylączyć urządzenie zgodnie z instrukcją obsługi.
2. Odłączyć urządzenie od gniazda zasilającego, jeśli nie jest przystosowane do ciągłej pracy w sieci.
3. Uporządkować stanowisko pracy.

V. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych:

1. Uszkodzone urządzenie lub jego akcesoria należy zabezpieczyć przed uruchomieniem.
2. W celu przeprowadzenia wymaganej naprawy, należy skontaktować się z Działem Gospodarki Aparaturowej.
3. W razie zaistnienia wypadku bezwzględnie udzielić pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.
4. Każdy zaistniały wypadek przy pracy niezwłocznie zgłosić swojemu przełożonemu, postępować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie procedurami.
5. W przypadku zaistnienia pożaru postępować zgodnie z zapisami obowiązującej w NIO-PIB Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
6. O awariach lub uszkodzeniach urządzenia należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego.

VI. Wykaz telefonów alarmowych

URSYNÓW UL. W. K. ROENTGENA 5	
Centralna Dyspozytornia	(22) 546 25 55, (22) 546 25 56
Ochrona (dowódca zmiany)	600 816 602
Zespół Reanimacyjny	(22) 546 25 25
Starszy Lekarz Dyżurny	(22) 546 23 40, 600 816 602
OCHOTA UL. WAWELSKA 15	
Dział Administracyjno - Gospodarczy	(22) 57 09 161, (22) 57 09 160
Ochrona (dowódca zmiany)	(22) 57 09 111/252
Zespół Reanimacyjny	(22) 57 09 123
POZOSTAŁE TELEFONY ALARMOWE	
Numer alarmowy	112
Państwowa Straż Pożarna	998
PSP Ursynów	(22) 596 71 70
Pogotowie Ratunkowe	999
Komenda Stołeczna Policji	997
Komisariat Policji na Ursynowie	(22) 603 19 78, (22) 641 26 16
Pogotowie gazowe	992, (22) 628 45 97
Pogotowie energetyczne	991

WYKAZ OSÓB ZAPOZNANYCH Z INSTRUKCJĄ

.....
/pieczęć jednostki/komórki organizacyjnej NIO-PIB/

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Data	Podpis
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				

